

HENGITYSSUOJAIN FFP3 - PUKEMINEN

Hengityssuojain FFP3



1. Avaa hengityksensuojaimen taitokset auki leuka-kappaleen läppää apuna käyttäen, jotta saat kuppimaisen muodon. Muotoile kevyesti nenäkappaletta keskeltä taivuttaen.



Huomioi, että molemmat kumilenkit pysyvät suojaimen etupuolella!

2. Pue peilin edessä. Jos käytät silmälasia, poista ne pukemisen ajaksi.



3. Tee istuvuuden tarkistus asettamalla molemmat kädet suojaimen päälle ja tee nopea ulospuhallus. Jos tunnet ilmapirtausta suojaimen sivulta aseta lenkit uudelleen ja toista testi.



Pue silmälasit, laita lasien sangat lenkkien päälle.



HENGITYSSUOJAIN FFP3 - RIISUMINEN

Hengityssuojain FFP3



1. Poista silmälasit



2. Ota molemmista kumilenkeistä kiinni ja poista suojain etukautta.



Älä koske suojaimen valkoiseen osaan!

